

Termékkatalógus
Fogorvosi anyagok

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 ADHEZÍV RENDSZEREK / TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE
Gluma Desensitizer 4

1.2 ADHEZÍV RENDSZEREK / SAV
Gluma Etch 5

1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK
Gluma 2Bond 6
Self Etch 7
Gluma Bond Universal 8

2.1 TÖMŐANYAGOK / FOLYÉKONY KOMPOZITOK
Charisma Flow 9

2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK
Charisma Classic 10
Charisma Topaz 12
Charisma Topaz ONE 14
Charisma Diamond 16

2.2 TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK
Charisma Easyshine 18
Translux wave 19

3.1 LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON
Variotime 20

3.2 LENYOMATANYAGOK / HARAPÁSRÖGZÍTŐ
Variotime bite 24

3.3 LENYOMATANYAGOK / ALGINÁTOK
Alginoplast / Xantalgin 25

3.4 LENYOMATANYAGOK / C-SZILIKON
Oxasil 26

4.1 IDEIGLENES ANYAGOK
Dentalon Plus 28

5.1 RÖNTGEN / INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM
Adfa Dentus E-speed 30

5.2 RÖNTGEN / KIEGÉSZÍTŐK
Agfa Dentus / Vegyszerek 31

6.1 HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS / EGYSZERHASZNÁLATOS TÚK
Selekt+ 32

KERESKEDŐK 34

ELÉRHETŐSÉGEK 35



GLUMA® DESENSITIZER

TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ OLDAT

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Fognyaki kopások, amelyek még nem igénylik az invazív beavatkozásokat
- A fogak preparálása után kialakuló posztoperatív érzékenység megelőzésére és csökkentésére

ELŐNYÖK:

- Csökkenti az érzékenységet
- Hatékony
- Adhezív rendszerekkel együtt is használható
- Penetrál a dentintubulusokba, nem képez filmréteget a foganyag felszínén, ezért indirekt pótlások készítése során is alkalmazható
- Klinikailag bizonyítottan 12 hónapon keresztül hatásos
- Nem szükséges megvilágítani fotopolimerizációs lámpával

TERMÉKEK: GLUMA DESENSITIZER

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
1 x 5 ml üveg	6600 3764



GLUMA® ETCH

35%- OS ORTOFOSZFORSAV GÉL

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

Zománc és zománc/dentin savval történő előkészítése a "total-etch" technikával alkalmazott adhezív rendszer applikálása előtt.

- Kompozit és kompomer restaurátumok
- Indirekt restaurátumok (inlayek, koronák, hidak, héjak)
- Barázdázárók

ELŐNYÖK:

- Egyszerűen használható és pontosan applikálható
- Könnyen elkülöníthető a foganyagtól

TERMÉKEK: GLUMA ETCH 35 GEL

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 2,5 ml fecskendő 25 db kanül	6600 0130



GLUMA® 2BOND

5. GENERÁCIÓS BOND

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Adhezív rögzítése direkt kompozit és kompomer restaurációknak
- Adhezív rögzítése indirekt kompozit és kerámia restaurációknak
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

TERMÉKEK: GLUMA® 2BOND

KÉSZLET

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml üveg 50 db applikátor vég Keverőpad Képes útmutató 2 x 2,5 ml GLUMA Etch 35 gél Fecskendő 25 db kanül	6604 0973

ELŐNYÖK:

- Kifejezett hatékonyság egyedi összetételének köszönhetően
- Egy réteg applikálása után végbemegy a primer és az adhezív penetrációja és csökkenti a túlérzékenységet
- Nagyobb biztonság: kimagasló kötőerő és kifejezett széli zárás érhető el a használatával
- Egyszerű használat: felhasználásra kész, egy üveges rendszer. Az anyag előzetes keverése vagy felrázása nélkül használható.

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml üveg 50 db applikátor vég Keverőpad képes útmutató	6604 0972

KEDVEZMÉNYES UTÁNTÖLTŐ CSOMAG

Tartalom	Cikkszám
3 x 4 ml üveg Képes útmutató	6604 0971

GLUMA® SELF ETCH

7. GENERÁCIÓS ÖNKONDÍCIONÁLÓ BOND

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Felszín adhezív előkészítése fényre kötő kompozitok számára
- Felszín adhezív előkészítése fényre kötő ragasztó cementekkel rögzülő indirekt pótlások számára
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

TERMÉKEK: GLUMA® SELF ETCH

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml üveg 50 db applikátor vég Keverőpad	6604 6246

ELŐNYÖK:

- Minimális behatási idő
- Azonnal kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Csupán egy réteg felvitele után végbemegy a felszín kondicionálása és a bondanyag penetrációja, valamint kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Kismértékű posztoperatív érzékenység
- A gluma self etch használatával kimagasló kötőerő és kifejezett széli zárás érhető el

KEDVEZMÉNYES UTÁNTÖLTŐ CSOMAG

Tartalom	Cikkszám
3 x 4 ml üveg Képes útmutató	6604 6247



GLUMA® BOND UNIVERSAL

UNIVERZÁLIS BOND

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Egy anyag biztosítja a direkt és indirekt restaurációk adhezív ragasztását – valamint a lepezések töréseinek, repedéseinek intraorális javítását.
- Bármely Black szerinti kavitásba készülő fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő metakrilát bázisú kompozit /kompomer direkt restauráció bonozása.
- Fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő csomkfelépítő anyagok bonozása.
- Túlérzékeny fogfelületek lezárása.
- Kavitások alábélelése amalgamtömés előtt.
- Barázdázások bonozása.
- Kavitások és preparált csomkok védelme az indirekt restaurációk rögzítése előtt (az immediate dentine sealing technikának megfelelően).
- Indirekt reastaurációk ragasztása fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő adhezív rezin cementekkel kombinálva.
- Kompozit és kompomer restaurációk, fémkerámia, fém és teljes kerámia restaurációk intraorális javítása.

TERMÉKEK: GLUMA® BOND UNIVERSAL

KÉSZLET

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal 1 x 4 ml GLUMA Ceramic primer 1 x 2.5 ml GLUMA etch 35 gel 25 zöld applikátor (vékony) 25 piros applikátor (normál) 10 savazó kanül Keverő lap Használati utasítás	6606 1423

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal Használati utasítás	6606 1421

KEDVEZMÉNYES UTÁNTÖLTŐ CSOMAG

Tartalom	Cikkszám
3 x 4 ml GLUMA Bond Universal Használati utasítás	6606 1422

GLUMA® CERAMIC PRIMER

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 ml GLUMA Ceramic primer	6606 1425



CHARISMA® FLOW

FOLYÉKONY HIBRID KOMPOZIT

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Barázdázás
- kiterjesztett barázdázás
- V. osztályú üregek
- Kis kiterjedésű, okklúziós erőknek nem kitett i. és ii. osztályú üregek
- kis kiterjedésű iii. osztályú üregek
- Kismértékű fogforma és fogszín korrekció
- Direkt és indirekt kompozit pótlások javítása
- Fogak sínezése
- Alábélelés
- Brekket ragasztás

ELŐNYÖK:

- A színe tökéletesen harmonizál a Charisma tömőanyagok színével
- Tixotróp
- Röntgenárnyékot ad
- Kifejezett kaméleon-hatás
- Széles színválaszték

TERMÉKEK: CHARISMA FLOW

KÉSZLET

Tartalom	Cikkszám
4 x 1,8 g (A1, A2, A3 színű és Baselinec fecskendő) kiegészítők	6601 5521

FLOW KANÜLÖK

Tartalom	Cikkszám
100 db kanül	6600 2613

1 X 1.8 G- OS UTÁNTÖLTŐK

Tartalom	Cikkszám
A1	6601 5495
A2	6601 5496
A3	6601 5497
A3.5	6601 5498
B2	6601 5499
B3	6601 5500
OA2	6601 5501
OA4	6601 5502
Baselinec	6601 5504



CHARISMA® CLASSIC

SZUBMIKROMÉTER HIBRID KOMPOZIT

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Direkt restaurációk az i.-V. osztályú Black kavitások esetén
- Direkt kompozit héjak
- Alakkorrekciók (pld. diasztéma zárás, veleszületett deformitások, stb.)
- Trauma vagy fogágy betegség miatt meggyengült fogak sinezése
- Tejfog restaurációk
- Kerámia vagy kompozit leplezések javítása (megfelelő javító készlettel kombinálva)



TERMÉKEK: CHARISMA CLASSIC

SYR COMBI KIT 8 X 4G + G2B

Tartalom	Cikkszám
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3 1 x 4 ml GLUMA 2Bond 2 x 25 ml GLUMA etch 35 gél Fogszínkulcs Piktogram	6605 6108

SYR COMBI KIT 6 X 4G + G2B

Tartalom	Cikkszám
2 X A2, A3, + 1 X A1, A3,5 1 x 4 ml GLUMA 2Bond 2 x 25 ml GLUMA etch 35 gél Piktogram	6605 6109

SYR ASSORTMENT 4 X 4 G

Tartalom	Cikkszám
A1, A2, A3, OA2 Fogszínkulcs Piktogram	6605 6110

SYR ASSORTMENT 8 X 4 G

Tartalom	Cikkszám
2 X A2, A3, + 1 X A1, A3.5, B2, OA2 Piktogram	6605 6111

FOGSZÍNKULCS

Tartalom	Cikkszám
1 db fogszínkulcs	6605 6113

1 X 4G-OS UTÁNTÖLTŐK

Tartalom	Cikkszám
A1	6605 6076
A2	6605 6077
A3	6605 6078
A3.5	6605 6079
A4	6605 6080
B1	6605 6101
B2	6605 6102
B3	6605 6103
C2	6605 6104
OA2	6605 6105
OA3	6605 6106
OA3.5	6605 6107



CHARISMA® TOPAZ

TCD BÁZISÚ NANOhibrid Kompozit

Az egyszerű felhasználás és az innovatív összetétel tökéletes esztétikát eredményez.

A Charisma kompozitok legsikeresebb tulajdonságainak egyesítése egyetlen termékben számunkra logikusnak tűnt.

“A fogorvoslás szövevényes mindennapjaiban üdítőek az olyan jellegű innovációk amik egyszerűsítik a munkánkat. A Charisma Topaz ONE light adaptív technológiájának alkalmazásával a tömések elkészítéséhez akár egyfajta tömőanyag használata is elegendő. Így meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a fogorvos munkáját.

Ezért is ajánlom a Topaz ONE-t Nektek!

DR. GÉCZI ZOLTÁN PH.D. FOGPÓTLÁSTAN SZAKORVOS

Interdental Klinika Fogorvosi Rendelő,
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika



EGYSZERŰ FELHASZNÁLÁS:

A Charisma Topaz egyesíti a krémes, ugyanakkor stabil konzisztenciát a hosszabb feldolgozási idővel és a polírozás utáni hosszantartó felszíni csillogással.

KIVÁLÓ FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

A Charisma Topaz alapja a szabadalmaztatott TCD-mátrix, amely a magas hajlítózilárdságot kombinálja a minimális zsugorodással. Ezen kívül kompatibilis az összes ismert bonddal és bondozási technikával.

VÁLTOZATOS RÉTEGEZÉS:

Akár monokromatikus, akár több színből készülő komplex rétegezési technikát választ, a végeredmény mindig megbízhatóan esztétikus restauráció lesz.

TERMÉKEK: CHARISMA TOPAZ

1 X 4 G- OS UTÁNTÖLTŐK

Színek	Cikkszám
A1	6606 7163
A2	6606 7164
A3	6606 7165
A3.5	6606 7166
A4	6606 7167
B1	6606 7168
B2	6606 7169
B3	6606 7170
C2	6606 7171
OL	6606 7172
OM	6606 7173
OD	6606 7174
CL	6606 7175
CO	6606 7176
BL	6606 7177
OB	6606 7178

SYRINGE BASIC KIT + GLUMA BOND UNIVERSAL

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 g (A2; A3; A3.5; B2; CL; OM színek) 1 x 4 ml GLUMA Bond Universal; 1 x 2.5 ml GLUMA etch 35 gel; Rétegezési útmutató Piktogram	6606 7179

SYRINGE MASTER KIT + GLUMA BOND UNIVERSAL

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 g (A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; A1 CL; OL; OM; OD színek) 1 x 4 ml GLUMA Bond Universal; 1 x 2.5 ml GLUMA etch 35 gel; Fogszínkulcs, Rétegezési útmutató, Piktogram	6606 7180

FOGSZÍN KULCS

Tartalom	Cikkszám
1 db Charisma Topaz fogszínkulcs	6606 7181



CHARISMA® TOPAZ ONE

EGY ÁRNYALAT MINDEN SZÍNHEZ!

A Charisma Topaz ONE shade univerzális kompozit rendkívüli színadaptációs képességgel bír, így bármilyen árnyalatú is legyen a páciens fogszíne posterior régióban, a ONE-nal készült restauráció észrevétlenül olvad a környezetébe, az egyedülálló light-adaptív technológiának köszönhetően.

TERMÉKEK: CHARISMA TOPAZ ONE

UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
CHARISMA TOPAZ SYR REFILL 1x4G - ONE	6608 7170

CHARISMA TOPAZ SYR ONE KIT

Tartalom	Cikkszám
2x4g Topaz One 1x4ml GLUMA Bond Universal	6608 7172



KLINIKAI ESET



DR. GÉCZI ZOLTÁN PH.D.

Interdental Klinika Fogorvosi Rendelő,
Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika



A páciens rendszeres fogorvosi ellenőrzés céljából kereste fel rendelőnket. Az anamnézis során a bal felső első nagyírlőjének okkluzális részén szuvasodást fedeztem fel.



A lézió feltárása során a zománc alatt kiterjedt szuvasodást találtam, melyet kofferdam izolálásban, caries indikátor használata mellett, kitisztítottunk.



A frissen elkészített tömés, ahol látható, hogy a Charisma Topáz One light adaptív technológiájának köszönhetően teljesen színhűen reprodukálja az eredeti fogszínt.



A kofferdam izolálás és a polírozás utáni állapot. Más megvilágítás mellett, más szögből is látható a restauráció színhűsége és az univerzális tömőanyag polírozhatósága.

CHARISMA® DIAMOND

TCD BÁZISÚ NANOHIBRID KOMPOZIT

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- I.-V. osztályú üregekhez
- Fogforma és fogsín korrekciója (pl. diasztéma zárás)
- Traumás sérülés vagy parodontális elváltozások miatt meglazult fogak sinezése
- Tejfogak ellátása
- Porcelán és kompozit restaurátumok javítása (megfelelő adhezív rendszerrel)
- Direkt kompozit héjak
- Csonkfelépítés



TERMÉKEK: CHARISMA DIAMOND

SYRINGE INTRO KIT

Tartalom	Cikkszám
1 x 4 g (A2, A3 és OM színek) Fogszínkulcs	6604 3863

SYRINGE BASIC KIT

Tartalom	Cikkszám
2 x 4 g (A2, A3, A3,5, OM és OD színek) Fogszínkulcs	6604 3864

SYRINGE MASTER KIT

Tartalom	Cikkszám
10 x 4 g (A2, A3, aA3,5, A4, B2, C2, OM, OD, Cl és Bl színek) 1 x 4 ml GLUMA 2Bond 2 x 2,5 ml GLUMA etch 35 gel Fogszínkulcs Kiegészítők	6604 3881

2- RÉTEGŰ FOGSZÍN KULCS

Tartalom	Cikkszám
1 db fogszínkulcs	6604 4554

1 X 4 G- OS UTÁNTÖLTŐK

Színek	Cikkszám
A1	6604 3882
A2	6604 3883
A3	6604 3884
A3.5	6604 3885
A4	6604 3886
B1	6604 3887
B2	6604 3888
B3	6604 3889
C2	6604 3890
C3	6604 3891
D3	6604 3892
Opák színek	
OL	6604 3893
OM	6604 3894
OD	6604 3895
Incizális színek	
CL	6604 3899
AM	6604 3900
CO	6604 3901
YO	6604 3902
Bleach színek	
BL	6604 3896
BXL	6604 3897
OB	6604 3898

CHARISMA® EASYSHINE

EGY LÉPÉSES POLÍROZÓ RENDSZER

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Fotopolimerizációs kompozit restaurációk polírozása, finírozása

ELŐNYÖK:

- A gyémántzemszékkel megerősített polírozó rendszer segítségével kiváló polírozási eredmény érhető el
- A finírozás és a polírozás egyetlen lépésben, a nyomás szabályozásával elvégezhető
- Három különböző forma biztosítja az összes intraorális applikáció megfelelő polírozhatóságát
- Az összes polírozó sterilizálható, ezáltal többször felhasználható

TERMÉKEK: CHARISMA EASYSHINE

POLISHING KIT

Tartalom	Cikkszám
6 db polírozó (2 x lág, 2 x nagy lág, 2 x harang)	6606 0002

UTÁNTÖLTŐ - HARANG

Tartalom	Cikkszám
12 db utántöltő	6606 0005

UTÁNTÖLTŐ - LÁNG

Tartalom	Cikkszám
12 db utántöltő	6606 0003

UTÁNTÖLTŐ - NAGY LÁNG

Tartalom	Cikkszám
12 db utántöltő	6606 0004



TRANSLUX® WAVE®

LED BÁZISÚ POLIMERIZÁCIÓS LÁMPA

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK:

- Toll forma: a könnyű és ergonomikus toll formájú kialakítás a kisebb kezű orvosoknak is kényelmes munkát biztosít.
- A kézidarab továbbfejlesztett törésszögének és a 360°-ban elforgatható fényvezető szárnak köszönhetően javult a moláris területhez való hozzáférés.
- Egyszerű kezelés: az egyetlen Bekapcsolás/program választó gomb segítségével könnyedén választhatunk 10 és 20 mp-es üzemmód között.
- LED fény mutatja a választott programot.
- Vezetékmentes: a vezetékmentes kiszereles maximális mozgásszabadságot biztosít.
- Megbízható teljesítmény: a Translux Wave erős és hosszú élettartamú li-ion akkumulátorral ellátott. Az akkumulátor töltése/újratöltése nagyon rövid időt vesz igénybe és az akkumulátor cseréje is gyors és egyszerű, nem igényel semmilyen segédeszközt. A beépített radiometer biztosítja az állandó teljesítményt a tökéletes polimerizációhoz.
- A Translux Wave a legmodernebb led bázisú polimerizációs lámpa, amely biztosítja az összes camphor quinone fotoiniciátorral működő fogászati anyagok optimális polimerizációját.

TERMÉKEK: TRANSLUX® WAVE® REGIO

Tartalom	Cikkszám
Kézidarab, 8 mm fényvezető, Fényvédő, Töltő egység, Tápegység	6605 5012

Műszaki adatok

Teljesítmény	> 1,200 mW/cm ²
Hullámhossz	440–480 nm
Töltő egység méretei	H: 140xsz: 60xm: 60 mm
Kézidarab méretei	H: 210 mm, Ø 23 mm
Súly	Töltő egység: 437g, kézidarab: 145g
Tápegység (töltő egység)	100 - 240 V (aC), 50/60 Hz, 5 W, 12–18 Va
Tápegység (kézidarab)	Újratölthető Li-ion akkumulátor 3.6 v/2000 mAh
Fényforrás	nagy teljesítményű mono-die LED
Fényvezető	Ø 8 mm, 70°



Tartozékok	Cikkszám
fényvezető, 8 mm, 70°	6605 7365
Újratölthető akkumulátor	6605 7363
Fényvédő (narancssárga)	6601 6455
Cserélhető érintkezők a töltőhöz	6605 7382
Kézidarab akkumulátorral	6605 7383
Töltő egység (szürke)	6605 7384
Tápegység	6605 7468

VARIOTIME®

VPS LENYOMATANYAG



INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Koronák és hidak
- Inlayek és onlayek
- Funkcionális lenyomatvételek
- Implantátum-protetika
- Nyitott-, és zárt kanalas lenyomatvételek

ELŐNYÖK:

- Pontosság és nagyfokú részletvisztaadó képesség
- Egyéni igények szerint több módon előkészíthető
- Egyszerűen és gyorsan keverhető
- Esetenként módosítható feldolgozási idő és rövid intraorális kötési idő
- Több mint 25 év klinikai tapasztalat a nagy pontosságú A-szilikon lenyomatanyagok terén
- Egyszerűen tárolható
- Lenyomatanyagok széles választéka 6 eltérő viszkozitással, amely alkalmassá teszi széles indikációs terület mellett bármely lenyomatvételi technika kivitelezéséhez
- Elérhető kézi keveréshez alkalmas, kartusos és dynamix-kartusos kiserelésben

INDIKÁCIÓS TÁBLÁZAT

A VARIOTIME® A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS

a Variotime termékpaletta egy jól átgondolt, minden lenyomatvételi technikához alkalmazható, összehangolt, sokoldalú rendszer, emellett az ön idejét is tiszteletben tartja.

Indikáció	Technika	Viszkozitás	Termékjavaslat
Koronák/hidak	Korrekciós (kétfázisú) lenyomatvételek	Magas viszkozitás	1. lépés Heavy Tray 2. lépés Extra Light Flow
		Gyúrható, Magas viszkozitás	1. lépés Putty 2. lépés Extra Light Flow
	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvételek	Magas viszkozitás	Heavy Tray + Medium Flow/ Light Flow
	Szendvics lenyomatvételek	Gyúrható, Magas viszkozitás	Putty + Medium Flow/ Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvételek	Közepes viszkozitás	Monophase
	Funkciós lenyomatvételek	Egyfázisú lenyomatvételek	Közepes viszkozitás
Inlay/Onlay	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvételek	Magas viszkozitás	Heavy Tray + Medium Flow/ Light Flow
	Szendvics lenyomatvételek	Gyúrható, Magas viszkozitás	Putty + Medium Flow/ Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvételek	Közepes viszkozitás	Monophase
Sztuációs/Implantátum lenyomatvételek	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvételek	Magas viszkozitás	Putty + Medium Flow/ Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvételek	Közepes viszkozitás	Monophase

TERMÉKEK

VARIOTIME AUTOMIX KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

HEAVY TRAY UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Heavy Tray 5 keverőcsőr (zöld)	6604 4998

LIGHT FLOW UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Light Flow 10 keverőcsőr (sárga)	6604 5038

MONOPHASE UTÁNTÖLTŐ UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Monophase 5 keverőcsőr (zöld)	6604 5032

EXTRA LIGHT FLOW UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Extra Light Flow 10 keverőcsőr (sárga)	6604 5040

MEDIUM FLOW UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Medium Flow 10 keverőcsőr (sárga)	6604 5036

KÉZI KEVERÉSŰ BEVEZETŐ KészLET

EASY PUTTY + FLOW BEVEZETŐ KészLET

Tartalom	Cikkszám
1 x 600 ml Easy Putty (300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)	6604 5044
1 x 50 ml Light Flow	
5 x keverőcsőr (sárga)	
5 x intraorális csúcs	
1 x Universal Adhesive (10 ml)	

KÉZI KEVERÉSŰ UTÁNTÖLTŐ

EASY PUTTY UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
600 ml Easy Putty (300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)	6604 4993

DYNAMIX® SPEED

NAGYSEBESSÉGŰ LENYOMATANYAG KEVERŐ KészÜLÉK

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- A dynamix speed nagyteljesítményű lenyomatanyag keverő készülék, amely képes megkeverni az összes konzisztenciájú lenyomatanyagot, beleértve a putty-t is
- Kompatibilis az összes 5:1 kiserelésű fóliás vagy patronos lenyomatanyaggal
- A speciális speed szimbólummal (csillag) megjelölt lenyomatanyagokat kétszeres sebességgel képes megkeverni

ELŐNYÖK:

- Nagysebességű keverés és adagolás akár 15 mp-en belül
- Homogén és buborékmentes anyag
- Állandó keverési minőség – a kezelőtől függetlenül
- A lenyomatanyag pontos adagolása
- 3 választható adagolási sebesség – 2 a lenyomat kanál töltéséhez (dynamix nagy sebesség, standard sebesség) és 1 a sulcus fecskendő töltéséhez
- A dugattyúk automatikus előre mozgása
- A dugattyúk automatikus visszahúzása a patronok cseréjéhez
- Biztonság - nyitott fedél mellett a dugattyúk nem mozognak
- A töltőmennyiség figyelmeztetés fényjelzéssel

TERMÉKEK: DYNAMIX-KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

DYNAMIX PUTTY UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 380 ml Dynamix Putty 2 Dynamix keverőcsőr 1 Dynamix rögzítő gyűrű	6604 4995

DYNAMIX HEAVY TRAY UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray 2 Dynamix keverőcsőr 1 Dynamix rögzítő gyűrű	6604 5000

DYNAMIX MONOPHASE UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 380 ml Dynamix Monophase 2 Dynamix keverőcsőr 1 Dynamix rögzítő gyűrű	6604 5034



VARIOTIME BITE®

SZKENNELHETŐ HARAPÁSRÖGZÍTŐ LENYOMATANYAG

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Hagományos harapásrögztítés záróharapási helyzetben
- Harapási villák készítése
- Támasztócsapos regisztráció
- Kisméretű szegmens minták készítése
- Pormentes lenyomatkészítés antagonista fogakról Cad/Cam technológiához

ELŐNYÖK:

- Nagyfokú végső keménység (shore d-skálán: 40)
- Nagyon gyors intraorális kötési idő (30 sec)
- Kompatibilis pormentes digitális lenyomatvételi eljárásokkal
- Kitűnő tixotrop tulajdonságok
- Tejföl-szerű konzisztencia
- Könnyen trimmelhető és frézélhető

TERMÉKEK: VARIOTIME BITE

50 ML-ES AUTOMIX KARTUSOS UTÁNTÖLTŐ

Tartalom	Cikkszám
2 x 50 ml Variotime Bite 10 keverőcsőr (zöld)	6604 5042



ALGINOPLAST® / XANTALGIN®

ALGINÁT LENYOMATANYAGOK

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Szituációs lenyomatok készítése
- Tanulmányi mintához
- Tervezéshez
- Antagonistához
- Munkamodellekhez

ELŐNYÖK:

ALGINOPLAST

- Pormentes és könnyen keverhető
- Nagy szakítószilárdság és rugalmasság
- Nagy részletviszaadó képesség
- Mentolos íz

XANTALGIN SELECT

- Gyorskötésű, finom paszta állagú alginát
- Krémes keverési konzisztencia
- Kifejezetten ajánlott túlérzékeny pácienseknek (pld. gyerekeknek)

XANTALGIN CRONO

- A keverési-kötési folyamatot színvál- tozás mutatja (kék/bíbor/rózsaszín/ fehér)
- Az optimalizált reakciómechanizmusnak köszönhetően akár 5 napig stabil

TERMÉKEK:

ALGINOPLAST

Tartalom	Cikkszám
500 g alginát por	6600 2444

XANTALGIN SELECT

Tartalom	Cikkszám
500 g alginát por	6600 2443

XANTALGIN CRONO

Tartalom	Cikkszám
500 g alginát por	6600 5221



OXASIL

C-SZILIKON A MINDENNAPI FELHASZNÁLÁSRA!

Az oxasil részlet-visszaadó képessége az Optosil/Xantoprenhez hasonlóan kimagasló. Használat közben nem lép fel érzékenységi probléma sem a latex-szel, sem pedig a retrakciós oldatokkal kapcsolatban. Széles indikációs skála: elsősorban a fogpótlások, koronák, hidak, Inlay / Onlay, funkcionális lenyomatok, illeszkedés ellenőrzés, ideiglenes lenyomatok, anatómiai lenyomatok.

“Kis fesztávú pótlásoknál a C-szilikonok is kiváló eredményt tudnak biztosítani. Az Oxasil a konzisztenciájának, könnyű kezelhetőségének és kontrasztos színeinek köszönhetően ideális választás.

DR. GÖTZ GERGELY
F+G Dent



Fotó: Püsök Renáta

ELŐNYÖK:

- Az oxasil új, továbbfejlesztett kézi keverésű C-szilikon lenyomatanyag család
- Indikációk széles skálájához alkalmazkodó konzisztencia-variációk: elsősorban a fogpótlások, koronák, hidak, Inlay-ek / Onlay-ek, funkcionális lenyomatok, illeszkedésellenőrzés, ideiglenes lenyomatok, anatómiai lenyomatok.
- Használat közben nem lép fel érzékenységi probléma sem a latex-szel, sem pedig a retrakciós oldatokkal kapcsolatban
- Az Oxasil hosszabb ideig, akár 21 napig tartja a méret-stabilitását
- Az oxasil 0,1 % borsmenta olajat tartalmaz. A kellemes, enyhe borsmenta ízesítés növeli a páciensek komfortérzetét lenyomatvétel közben.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK:

Termék	Cikkszám
Oxasil Soft Putty 1x900 ml	6607 7390
Oxasil Putty 1x900 ml	6607 7391
Oxasil Light Flow 1x140 ml	6607 7392
Oxasil Very Light Flow 1x140 ml	6607 7393
Oxasil Mucosa 1x140 ml	6607 7394
Oxasil Activator Paste 60ml	6607 7396



DENTALON® PLUS

METAKRILÁT BÁZISÚ IDEIGLENES KORONA- HÍDANYAG

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Ideiglenes koronák és hidak készítéséhez

ELŐNYÖK:

- Jól polírozható
- Magas mechanikai stabilitás
- Az amin-mentes katalizátornak köszönhetően jó a színállósága



TERMÉKEK: DENTALON PLUS KÉSZLET

DENTALON PLUS KÉSZLET

Tartalom	Cikkszám
1 x 45 ml folyadék	6504 1200
2 x 20 g por l, m és d színekben (6 x 20 g)	
keverő pipetta, keverő pad	

TERMÉKEK: DENTALON PLUS POR

DENTALON PLUS POR L (VILÁGOS)

Tartalom	Cikkszám
1 x 100 g por	6504 1065

DENTALON PLUS POR M (KÖZEPES)

Tartalom	Cikkszám
1 x 20 g por	6504 1111

TERMÉKEK: DENTALON PLUS FOLYADÉK

DENTALON PLUS KÉSZLET

Tartalom	Cikkszám
1 x 45 ml folyadék üvegcsében	6504 1146

DENTALON PLUS POR M (KÖZEPES)

Tartalom	Cikkszám
1 x 100 g por	6504 1073

DENTALON PLUS POR D (SÖTÉT)

Tartalom	Cikkszám
1 x 100 g por	6504 1057

DENTALON PLUS FOLYADÉK

Tartalom	Cikkszám
1 x 250 ml folyadék üvegcsében	6504 1138



AGFA DENTUS® E-SPEED

INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Altalánosan alkalmazható intraorális röntgenfilm
- Kézi-, és gépi előhíváshoz

ELŐNYÖK:

- Elősegíti a pontos diagnózis felállítását - nagy kontraszt és magas maximális denzitás (jól elkülöníthető szürkeintenziás)
- Rövid expozíciós idő - elkerülhető az elmozdulás miatt kialakult elmosódott területek
- Softopac borítás, puha film-szélek
- Puha, zárt, jól fertőtleníthető csomagolás
- A film jól megtervezett csomagolása lehetővé teszi a biztonságos előhívását még a sötétkammerában is
- Előhívása több előhívó-rendszerrel is lehetséges
- Jól archiválható, akár 30 évig is megőrzi a felvett képet
- Alacsony szemcsézettség és kis fátyolosodás

TERMÉKEK: E-SPEED RÖNTGENFILM

E-SPEED RÖNTGENFILM

Tartalom	Cikkszám
150 db röntgenfilm	6603 5581



AGFA DENTUS® / VEGYSZEREK

ELŐHÍVÓ ÉS FIXÁLÓ KONCENTRÁTUMOK

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Kézi előhíváshoz és előhívó-kádas egységekhez

TERMÉKEK: AGFA DENTUSRA

D DEVELOPER CONCENTRATE

Tartalom	Cikkszám
125 ml előhívó koncentrátum	6569 4510

F-1000 FIXER CONCENTRATE

Tartalom	Cikkszám
1000 ml fixáló koncentrátum	6528 2259

ELŐNYÖK:

- Színkóddal megkülönböztethető előhívó és fixáló
- Adagolást segítő beosztás az 1l-es palackon
- Glutáraldehid mentes
- Könnyen előkészíthető oldat
- Többféle kiserelésben elérhető (125ml és 1l)
- Újrahasznosítható polietilénből készült palack

F CONCENTRATE FIXER

Tartalom	Cikkszám
125 ml fixáló koncentrátum	6569 4502

D-1000 DEVELOPER CONCENTRATE

Tartalom	Cikkszám
1000 ml előhívó koncentrátum	6528 2194



SELEKT+®

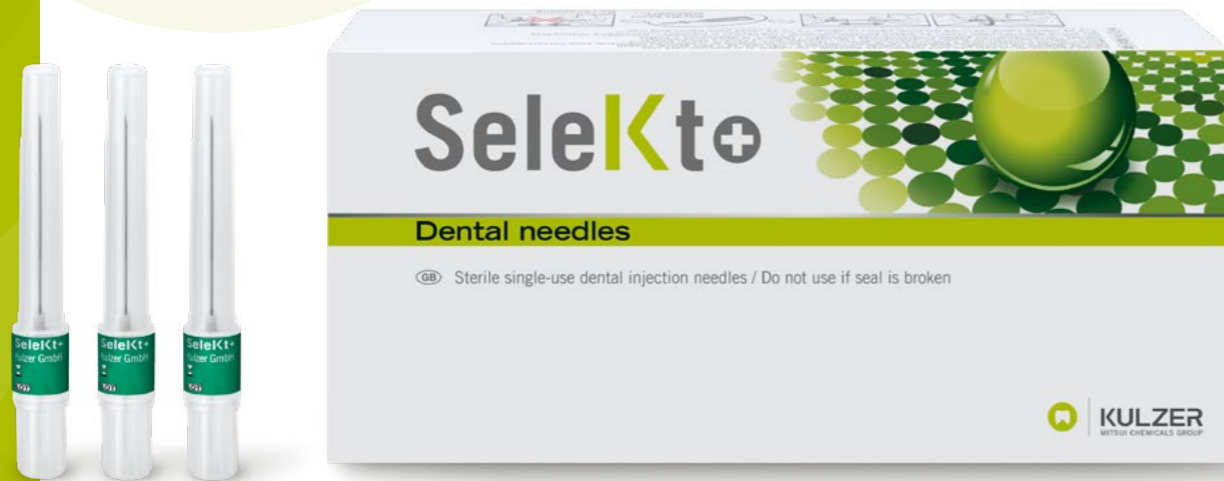
EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL KANÜLÖK CILINDERAMPULLÁKHOZ

INDIKÁCIÓS TERÜLET:

- Bármely típusú fogászati helyi érzéstelenítés

ELŐNYÖK:

- Kisebb fájdalom a háromszoros fazetta csiszolatnak köszönhetően.
- Különleges szilikon bevonat biztosítja, hogy a tű könnyedén csússzon át a szöveteken.
- Biztonságos kezelés a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

**TERMÉKEK: SELEKT+****METRIKUS KANÜLÖK**

Tartalom	Szín	Külső átmérő	Tű hossz	Indikáció	Cikkszám
Selekt+ Carpule Needles Regio Metric 30G 0,3x12	kék	0,3 mm	12 mm	intraaligamentális	6606 6214
Selekt+ Carpule Needles Regio Metric 30G 0,3x21	sárga	0,3 mm	21 mm	intraaligamentális	6606 6216
Selekt+ Carpule Needles Regio Metric 20G 0,3x25	narancs	0,3 mm	25 mm	infiltrációs	6606 6217
Selekt+ Carpule Needles Regio Metric 27G 0,4x16	zöld	0,4 mm	16 mm	infiltrációs	6606 6215
Selekt+ Carpule Needles Regio Metric 27G 0,4x35	piros	0,4 mm	35 mm	infiltrációs	6606 6218



Kereskedő partner	Elérhetőség	Weboldal
Realtrade Kft.	1102 Budapest, Hölgy utca 9/a. Telefon: +36 30 977 7612 Email: raktar@realtrade.hu, abosztory@realtrade.hu	https://realtrade.hu
Hera Shop webáruház	Telefon: +36 30 643-1797	https://hera-shop.hu/
2M Fogászati Kkt. Cegléd	2700 Cegléd, Szent Imre Herceg u. 17. Telefon: +36 53 500-003	https://www.2mkk.hu/
Á-Dent Kft. Szeged	6724 Szeged, Pacsirta u. 1. Telefon: +36 62 425-050	https://adent.hu/
Alba Dental 2002 Kft. Székesfehérvár	8000 Székesfehérvár, Ybl M. u. 13. Telefon: +36 20 3515540	
Apex Dental Kft. Miskolc	3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 28. Tel/Fax: +36 46 411-512	https://apexdental.hu/
Creativ Dental Bt. Budapest	1212 Budapest, Széchenyi István utca 92/B Telefon: +36 1 276-0435	https://www.creativdental.hu/
CrocoDental Webáruház (Szabó Company Kft.)	6726 Szeged, Derkovits Faszor 91. Telefon: +36 30 660-9583	https://crocodental.eu/hu/
Dental-Medical Kft.	Telefon: +36 30 789-6445 Email: info@dental-medical.hu	https://dental-medical.hu
Dental Professional Kft. Miskolc	3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 13/B/A. 1/1 Telefon: +36 70 633 – 5293 E-mail: info@dentalprofessional.hu	https://www.dentalprofessional.hu/
Dóm-Dent Kft. Szeged	6725 Szeged, Felhő utca 9. Telefon: +36 62 426-438, 62 424-072	https://www.dom-dent.hu/
Front-Dent Kft. Budapest	1135 Budapest, Országbíró u. 65. Telefon: +36 1 218 0244 Email: info@frontdent.hu	https://www.frontdent.hu/
Hedident Kft. Sopron	9400 Sopron, Deák tér 56 Telefon: +36 99 313-060	
Kiru Dent Kft. Székesfehérvár	8000 Székesfehérvár, Erkel Ferenc u. 2 Telefon: +36 20 251 5623	
Lizydent Kft Budapest	1134 Budapest, Botond u. 10 Telefon: +36 1 238-0141	https://www.lizydent.hu/
M+W Dental Kft.	Telefon: +36 1 436-9790 Fax: +36 1 436-9799 Email: dental@mwidental.hu	https://mwdental.hu
Med Dent System Kft. Pécs	7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: +36 72 215-115	https://www.meddent.hu/
Medi Cont Kft. Győr	9024 Győr, Hold u. 12. Telefon: +36 96 516-360	https://www.medi-cont.hu/
Modent Kft. Budapest	1077 Budapest, Rózsa u. 29. Telefon: +36 1 342-9348	https://www.modent.hu/
Molnár Kereskedőház Kft. Győr	9023 Győr, Verseny utca 30-32. Tel./Fax: +36 70 442-4442	https://molnarkerhas.hu/hu/
Netdent Trade Kft. Szeged	6726 Szeged, Fő fasor 22. Telefon: +36 20 591-8375	https://www.netdent.hu/
Ragoncsa Imre Pécs	7628 Pécs, Szabolcsi út 16 Telefon: +36 20 393 0005	
Sanitaria Kft.	1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34. Telefon: +36 1 336-0884, +36 1 336-0885 Fax: +36 1 336-0860 E-mail: shop@sanitaria.hu	https://sanitaria.hu/
Scarbadent Kft. Sopron	9400 Sopron, Úttörő utca 16. Telefon: +36 30 411 2992	
Tőkés Dental Bt. Budapest	1085 Budapest, Baross u. 38 Telefon: +36 1 317-1434	
Victory Dent Kft. Pécs	7623 Pécs, Nagyvárud u. 20 Telefon: +36 72 547-557	
Dental-unio Kft. Győr	9027 Győr, Puskás Tivadar u. 10. Telefon: +36 96 518 047 E-mail: office@dentalunio.hu	http://www.dentalunio.hu/



KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS!



Prazsák László

Key Account Manager Fogtechnika

tel.: +36 30 701 5258

e-mail.: laszlo.prazsak@kulzer-dental.com



Szövördi Katalin

Key Account Manager Fogászat

tel.: +36 30 441 8898

e-mail.: katalin.szovordi@kulzer-dental.com



Kulzer Hungary




kulzerhungary



www.mykulzer.hu
www.kulzer.com

Irodánk címe:

Kulzer Hungary Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 101-103.



Kulzer Hungary Kft.

1143. Budapest, Stefánia út 101-103.

www.mykulzer.hu • www.kulzer.com